

# Airboots

beoka by weelko

## Sistema de compresión inalámbrico para recuperación de piernas

Equipo profesional de relajación profunda para pies y piernas

- Alivio Deportivo Profesional
- Mejora la Circulación Sanguínea
- Masaje Relajante Diario


FDA Autorizado



Diseño sin cables



Diseño de carga extraíble

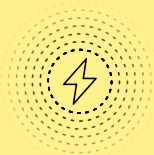

Diseño de presión de aire Sin costuras de 5 secciones



APP Control de conexión



5 niveles Ajuste de presión



Diseño con cremallera



3 modos de masaje



## Masaje personalizado

**ZONA 1**  
Muslos

**ZONA 2**  
Rodillas

**ZONA 3**  
Pantorrilla

**ZONA 4**  
Tobillos

**ZONA 5**  
Pies




Consigue la mejor relajación de piernas basado en los principios de la fisioterapia profesional.

## Medidas del producto




**Muslo superior**

**Costura**

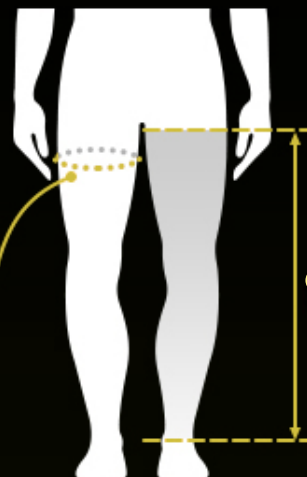

## Airbags de compresión de 5 zonas


Estructura de airbag superpuesta, masaje de presión de aire envolvente, masaje profundo de 360° sin puntos ciegos, favorece la circulación sanguínea y una recuperación más rápida.

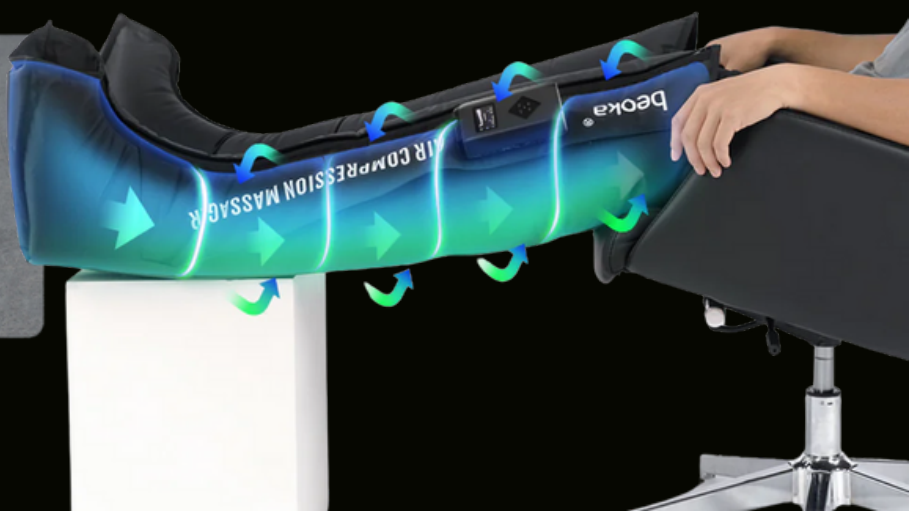


# Cámaras de aire totalmente superpuestas

## Masaje de 360°

Bota de compresión Beoka:

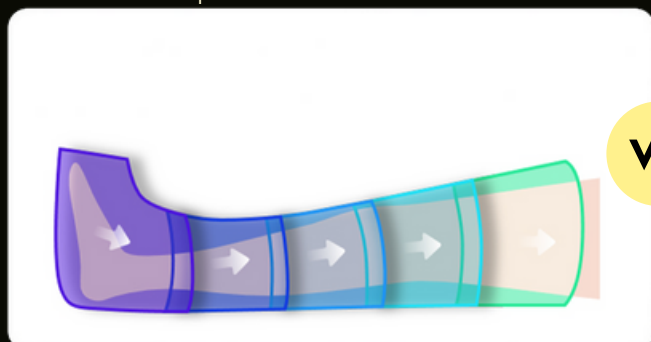

Otras:

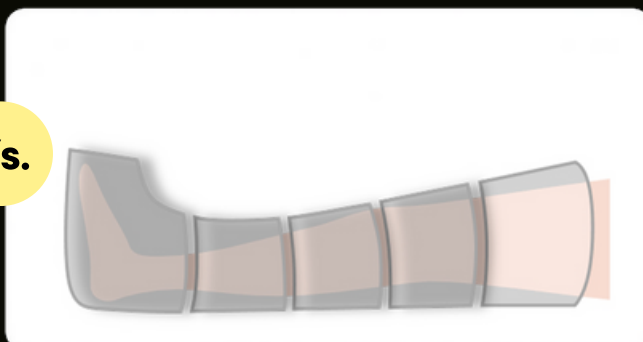


**Vs.**

## 5 modos de relajación



La compresión neumática intermitente es un masaje humanoide, con una presión razonable en ciclos que estimulan la contracción muscular.

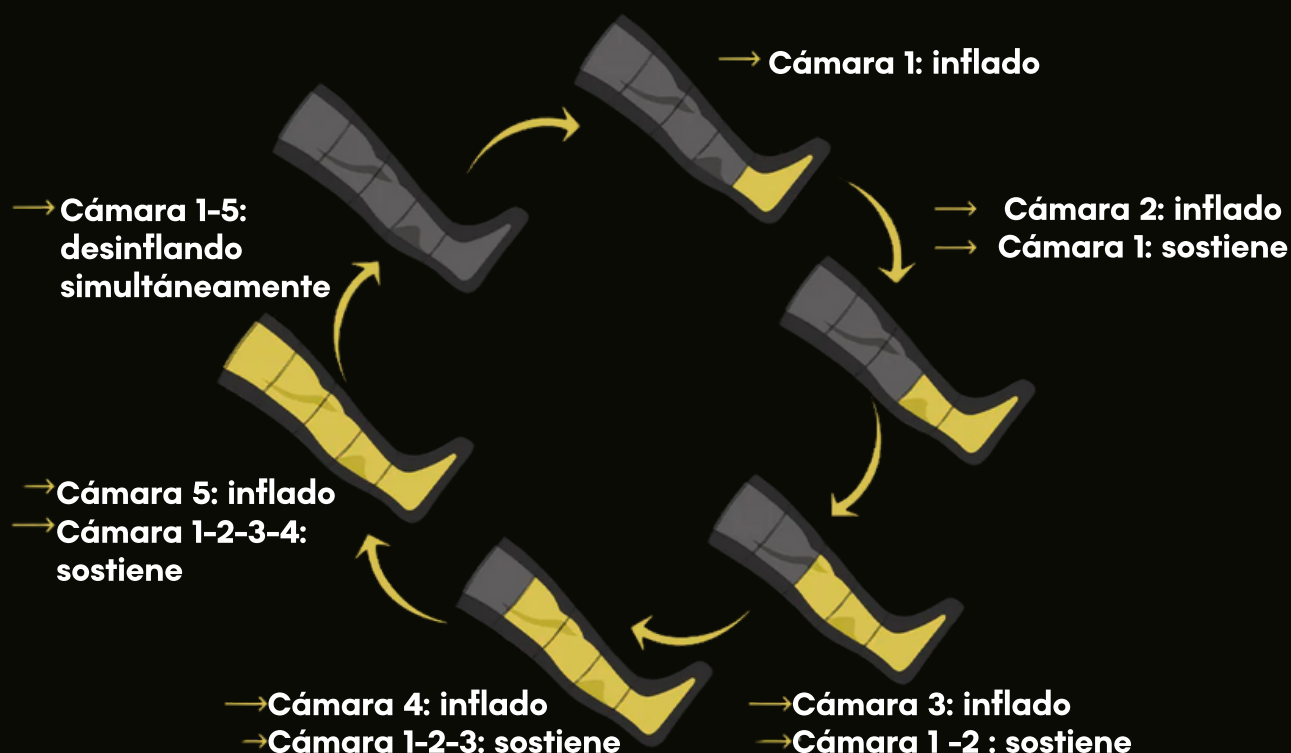

## Uso inalámbrico y carga de batería extraíble




Puedes disfrutar utilizando las botas de masaje de compresión para piernas con familiares o amigos en cualquier momento y lugar para relajar los músculos de las piernas y aliviar la fatiga; El diseño de carga de la batería extraíble le permite deshacerse de las limitaciones de la conexión inalámbrica y sin intubación, y el material a prueba de sudor y el sudor es más fácil de limpiar, lo que facilita el masaje de relajación.



## Conexión App masaje personalizado

Conéctate a la aplicación para disfrutar de un masaje sincronizado

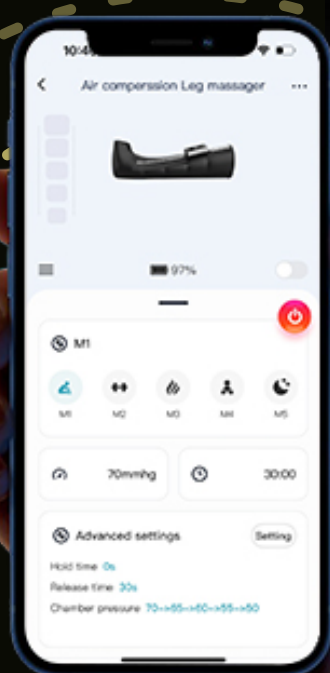

## ¿Quién lo necesita?

- Personas que experimentan fatiga en las piernas
- Entusiastas del fitness
- Personas mayores



## Características

- Método científico de recuperación
- Favorece la circulación sanguínea
- Alivio deportivo profesional
- Relajación diaria

## Bolsa de almacenamiento portátil



Costuras finas con doble pespunte y sin fugas



Diseño de enlace YDD de las mejores marcas



Tejido impermeable, resistente al sudor y fácil de limpiar



Diseño con gancho y ahorra espacio

## Guía de uso



Desembale con cuidado el Beoka AI Plus, asegurándose de manipular con delicadeza las botas de masaje de aire y los accesorios incluidos.



Retire la batería e instálela correctamente en la posición designada para garantizar que la batería esté en contacto firme con el dispositivo para garantizar un suministro de energía estable y un funcionamiento seguro del dispositivo.



Ubique un lugar cómodo para sentarse y coloque fácilmente las botas de masaje sobre cada pierna, cerrándolas sin problemas como lo haría con botas normales.



Ajuste las cremalleras para lograr un ajuste ceñido pero cómodo, asegurándose de que estén aseguradas para una cobertura de compresión completa y efectiva.



Encienda las botas de masaje presionando el botón de encendido en el panel de control, lo que significa que están preparadas para su tratamiento de masaje.



Personalice su experiencia de masaje eligiendo el modo, la intensidad y la duración que desee mediante el panel de control. Dispone de varios programas y ajustes de intensidad para adaptarse a su nivel de comodidad.



Después de configurar sus preferencias de masaje, comience la sesión. Recuéstese y relájese mientras las botas de masaje de compresión de aire se inflan y desinflan secuencialmente, envolviendo suavemente sus piernas y pies con una presión reconfortante.